

【尿バッグを車椅子に簡単取付】

スマートハンガー[®] I型

商標登録 登録第6276671号

(車椅子取付尿バッグハンガー)

特許申請中

第35回日本環境感染学会
(2020年2月)に出展しました!



尿バッグ取付前



尿バッグ取付後

尿バッグを車椅子の座席の下に取付けることで
患者さんの脚で尿バッグを目隠しすることができます

尿バッグの取付高さは自由に変えられ、そのまま
車椅子を折りたたむことができます

また、車椅子の後方に取付けることもできます



株式会社 樋原製作所

〒590-0153 大阪府堺市南区大庭寺611-3 TEL.072-293-1111

e-mail hibara@hbrind.co.jp FAX.072-293-1112

URL <https://www.hbrind.co.jp>

【尿バッグを車椅子に簡単取付】

特許申請中

スマートハンガー I型

(車椅子取付尿バッグハンガー)



スマートハンガ-前方取付

車椅子の左右ティッピングバー前方パイプにスマートハンガーの左右クランプで挟んで取付ます
上部に付いているハンガーに尿バッグをかけます

尿バッグ前方取付 (取付前 取付後)



スマートハンガ-後方取付

車椅子の左右ティッピングバーパイプにスマートハンガーの左右クランプで挟んで取付ます
上部に付いているハンガーに尿バッグをかけます

尿バッグ後方取付 (取付前 取付後)



スマートハンガ-折り畳み

スマートハンガーが付いた状態で折り畳むことができます

スマートハンガ-高さ調整

スマートハンガー左右パイプを回転させて高さを調整します

スマートハンガ-折り畳み

スマートハンガ-MAX高さ

本体概略最小寸法:W80×H300×D100

スマートハンガー長さ:300~420mm

スマートハンガー床からのハンガー高さ

:約250~400mm

*注:前方・後方取付、車椅子で変化します

スマートハンガー耐荷重:3kg

販売元