

Made in Japan



ポール内にハンガーを収納でコンパクト

# スマートポール<sup>®</sup> I


## SMART POLE I

車椅子に装着した状態で  
そのまま使用できます。

- 特許6042715
  - 商標登録 登録第6347834号
- ※右のQRコードから製品説明のビデオ  
にアクセスできます。



- ◆ 伸縮式。昇降操作時に誤って手を放してもポールが落下することはありません。
- ◆ 大きな力がかかってもポールが落下することはありません。
- ◆ ハンガー部分をパイプ内に収納するので未使用時は車椅子に取り付けたままでも邪魔になりません。
- ◆ オプションの軽量スタンドで緊急携帯用として使用できます。

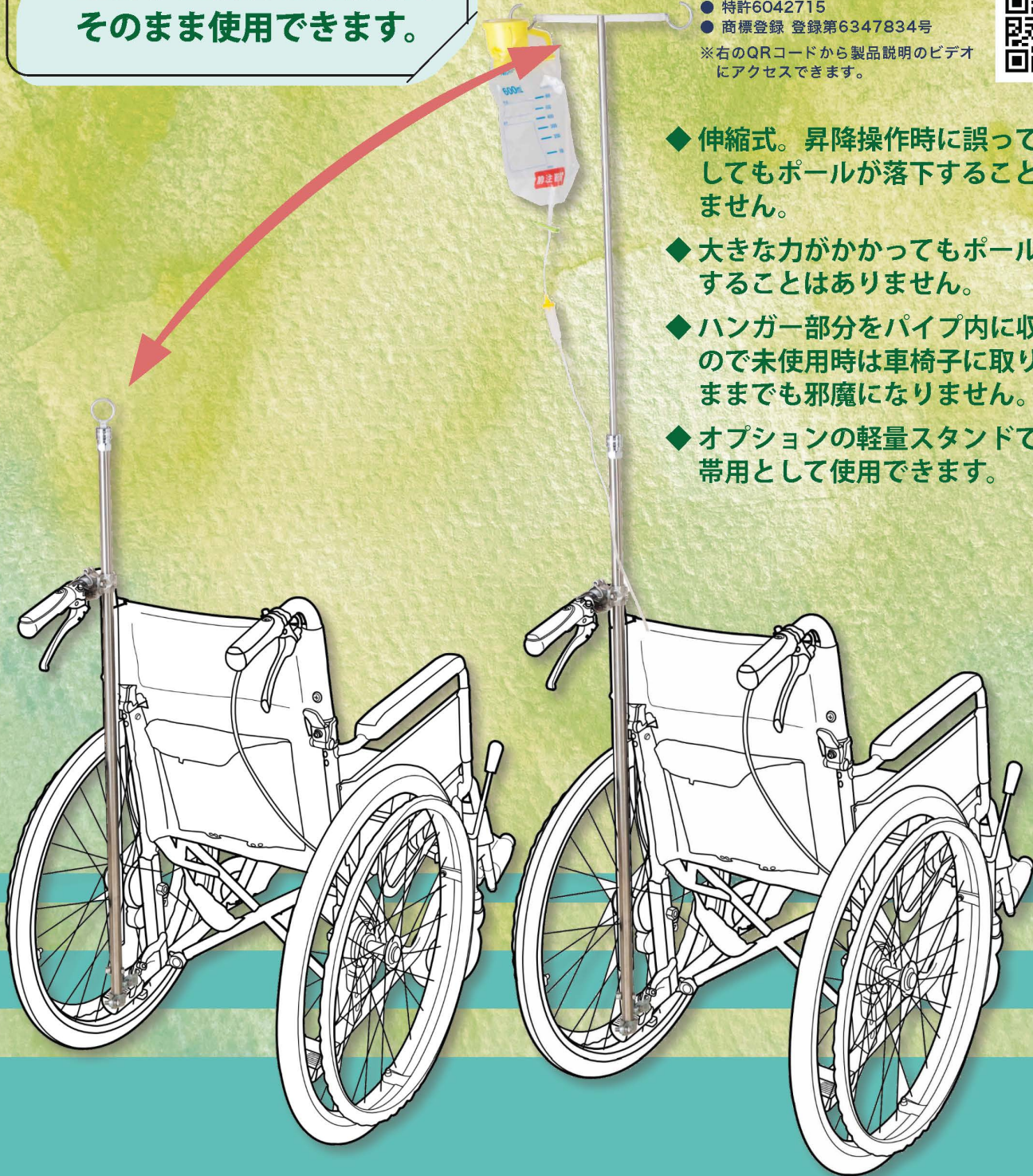




株式会社樋原製作所  
Hibara Industries, Co., Ltd.




# 操作方法

## ポールの昇降とフック部分をポール内に収納

点滴を引っ掛けるフック部分は右図のように折りたんでポール内に収納できます。

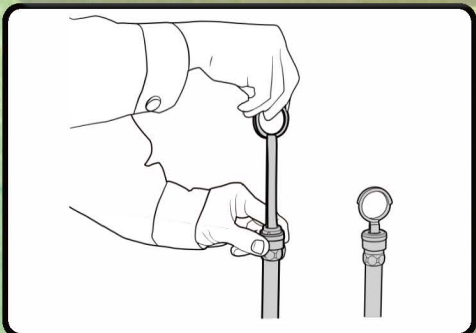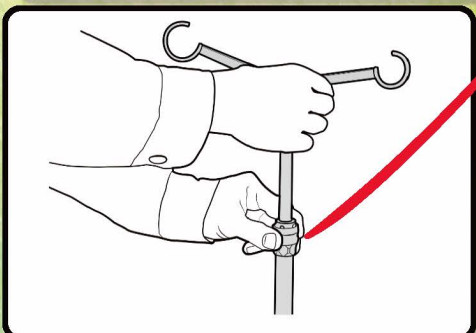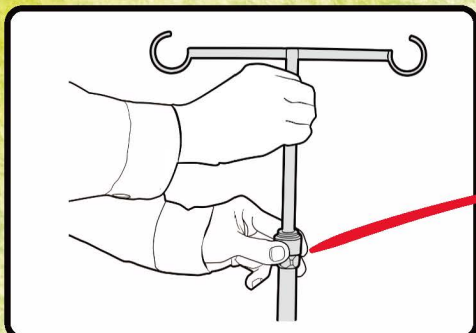


### 昇降ロック装置

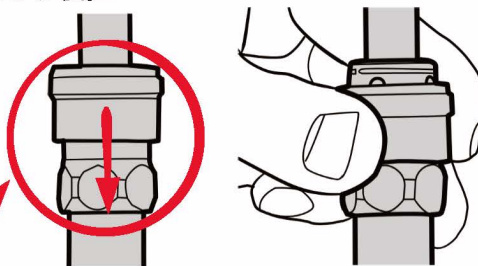

昇降ロック装置を指で摘んで下へ降ろすとロックが解除されます。  
 ポールを上げる、または下げて手を放すとロック装置が上に上がってポールがロックされます。  
 戻りが十分でない場合はロック装置を指で摘んで引き上げてください。

### 伸縮時の長さ

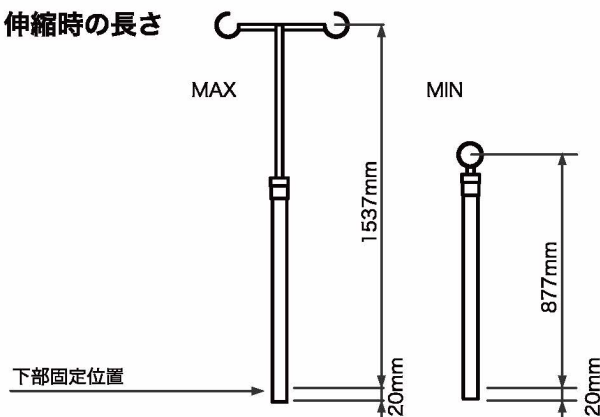

## 主な仕様

- 品番 HB001-P01-001
- サイズ 点滴ポール本体 877mm~1537mm (下部固定位置寸法を除く)
- 材質 内側/外側ポール SUS304TKC-A  
 アーム部 SUS304  
 昇降ロック装置 鋼鉄 クロームメッキ  
 OPスタンド アルミニウム
- オプション (別売) 軽量ポールスタンド

### 軽量ポールスタンド (オプション)

軽量スタンドには点滴ポールに取り付けた状態で折りたんで収納できる専用キャリーバックが付属しています。



この製品のお問い合わせ・ご用命は……

開発・製造

**株式会社樋原製作所**  
**Hibara Industries, Co., Ltd.**

〒590-0153 大阪府堺市南区大庭寺611-3  
 TEL 072-293-1111 FAX 072-293-1112  
 E-mail : hibara@hbrind.co.jp